

PUNTE ULTRASONICHE MULTI-FUNZIONALI
PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE



Varios CATALOGO PUNTE



Powerful Partners®

NSK offre un'ampia scelta di punte ultrasoniche per ogni tipo di applicazione.

Conservativa

Pag. 30-35



Scaling

Pag. 6-9



Perio

Pag. 12-16



Protesica

Pag. 38-39



Implantologia

Pag. 17



Endodoncia

Pag. 20-25




Chirurgia Endodontica Retrograda

Pag. 26-27



Varios Punte per NSK / Satelec® / EMS®

Le punte Varios NSK sono compatibili con i manipoli degli ablatori ultrasonici Satelec® e EMS®, così come con quelli NSK. A seguito una guida che illustra le compatibilità.

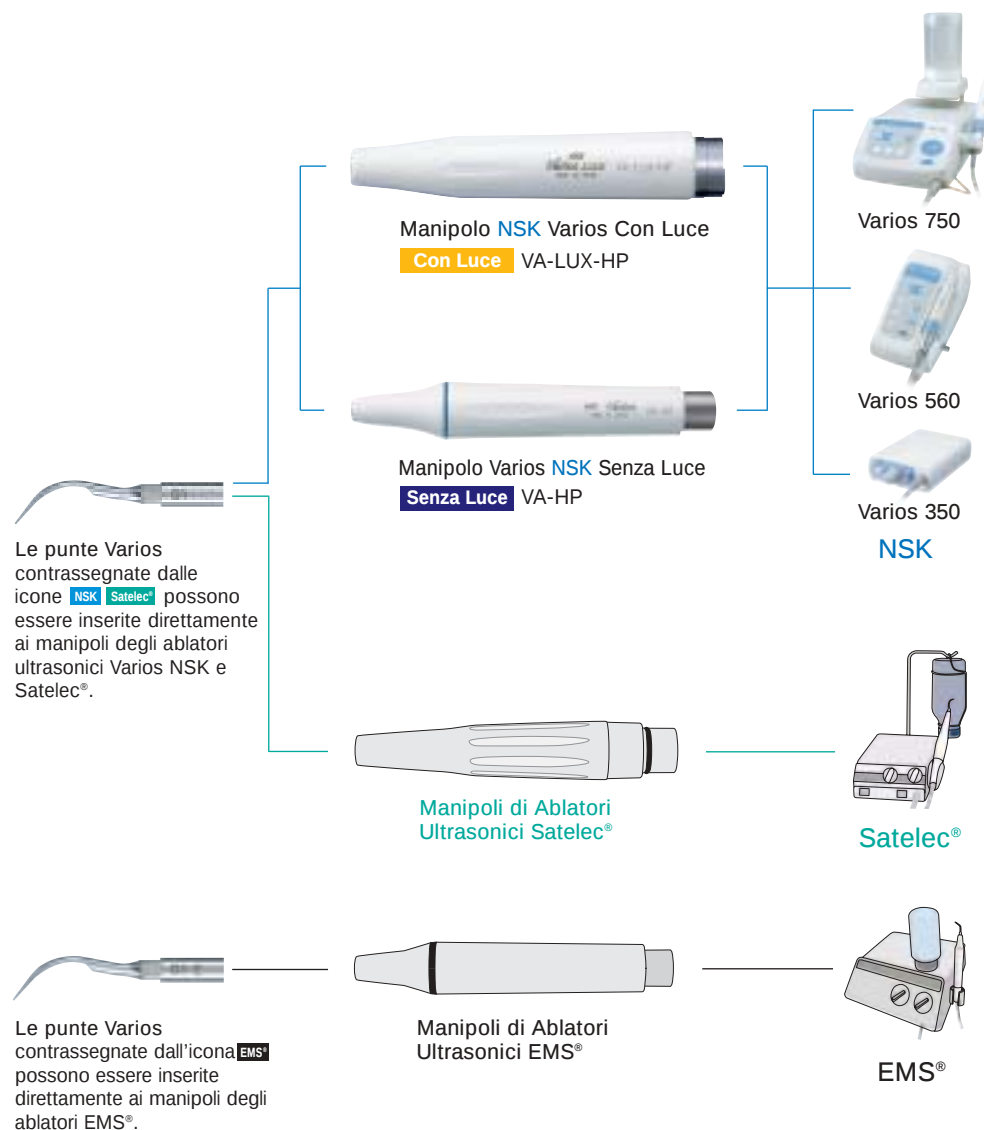

Varios Punte V-Tip ... Originali NSK




Il sistema di supporto NSK per punte Varios V-Tip è un sistema alquanto innovativo e multifunzionale. Infatti permette di sostituire in modo facile ed economico le punte V-Tip offrendo la possibilità di soddisfare ampiamente, e in modo flessibile, le varie esigenze relative alle diverse applicazioni cliniche.

Conservativa

Pag. 30-33

- Per micro-conservativa
- Per rifinitura e lucidatura
- Per micro-cavità

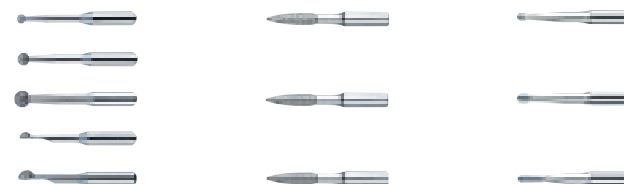

Endodonzia

Pag. 24-25

- Per detersione canale radicolare
- Per ampliamento canale radicolare




Implantologia

Pag. 17



SCALING

Sistema di ablazione ad ultrasuoni a vibrazione precisa e regolare che evita danni alla struttura naturale dei denti. I 10 tipi di Punta Varios NSK per Scaling permettono la facile rimozione del tartaro interdentale, del tartaro depositato al colletto del dente e nella parte superiore delle gengive.

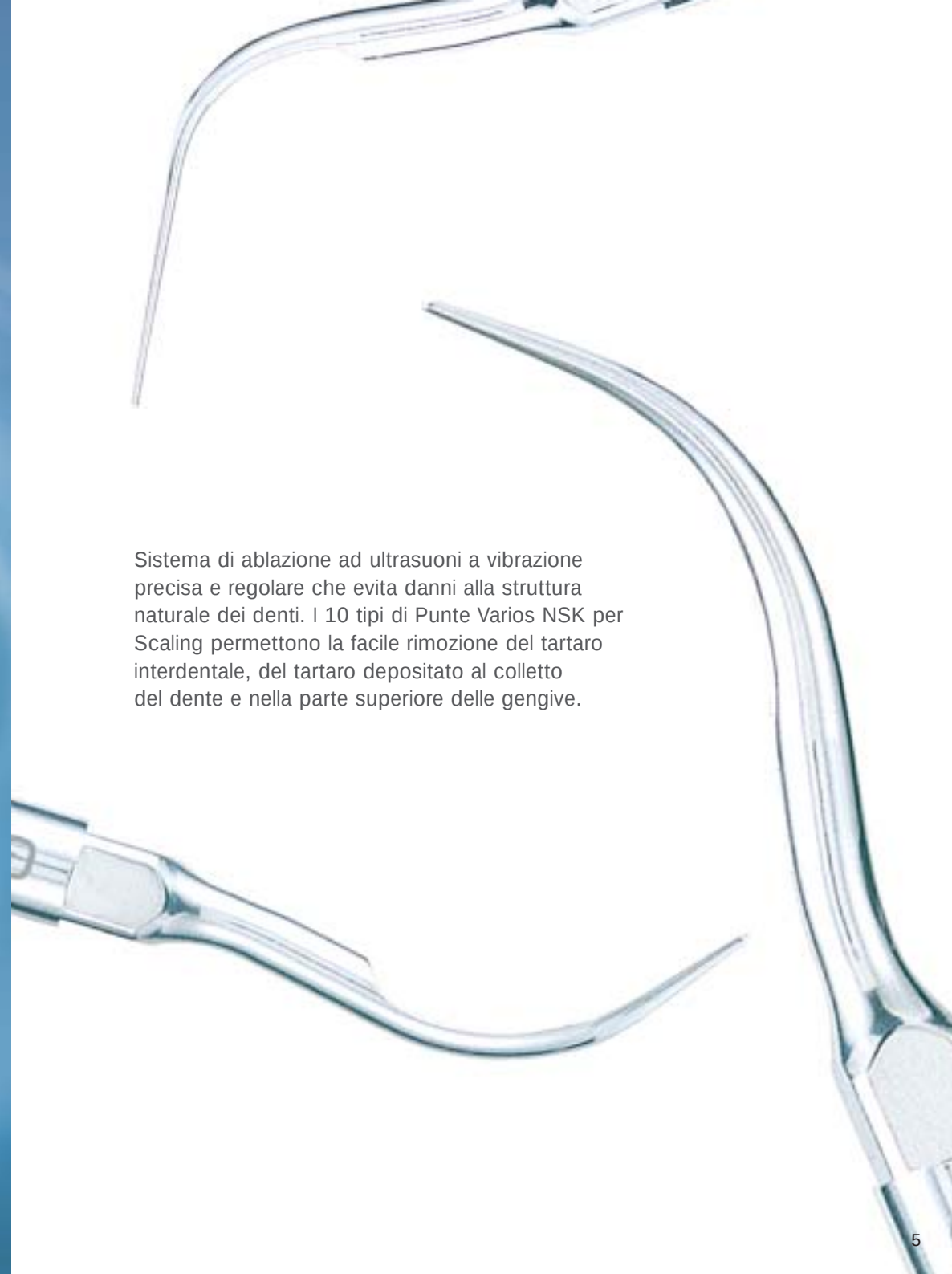

SCALING

G1

Per rimuovere il tartaro dagli anteriori, dal colletto dei molari e nella parte superiore delle gengive, la parte laterale della punta Varios deve essere posizionata sul dente e mossa lateralmente.



G2

Per rimuovere gravosi ammassi di tartaro, posizionare la sommità della punta piatta G2 contro la superficie del dente e azionare l'ablatore ad ultrasuoni.



G3

Per rimuovere rilevanti macchie di nicotina, posizionare la sommità e la parte laterale della punta sulla superficie del dente e muovere delicatamente con movimento verticale.



G4

Assicura la rimozione del tartaro interdentale e del tartaro depositato nella parte sottostante le gengive dagli anteriori e dai molari. Per rimuovere il tartaro dagli anteriori, posizionare la sommità della punta sul colletto del dente e spostarla lungo la superficie del dente.



G5

Per rimuovere il tartaro interdentale e il tartaro depositato nelle tasche gengivali, inserire la punta tra i denti premendola sulla superficie del dente.



G6

Inserire la punta tra i denti e rimuovere il tartaro cercando di tenere la sommità della punta sulla superficie del dente.



SCALING

G7

Assicura la rimozione di consistenti ammassi di tartaro interdentale.



G11

Modello universale, per la rimozione del tartaro da un'ampia superficie, come ad esempio dagli anteriori.



G12

Modello Perio. La punta dall'angolazione tagliente rimuove il tartaro dai molari.



G13

Modello a falce, utile per rimuovere il tartaro interdentale e quello depositato nel colletto del dente.




PERIO

Le punte Varios, angolate a destra e sinistra, oltre a quelle dritte, assicurano un migliore approccio alla forcazione e alle pareti delle radici curve.

PERIO (ROOT PLANING)


P1

Punta ultra sottile che permette un facile accesso agli anteriori, alle tasche gengivali strette e ai denti affollati.

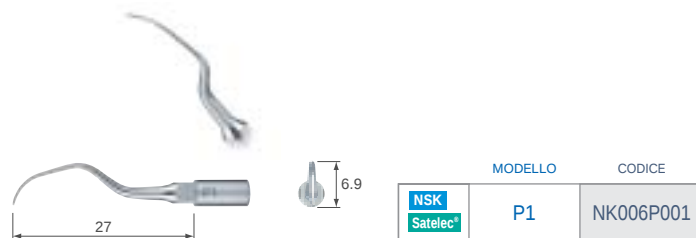

P1D

P1D è una punta diamantata dalla forma simile a quella della punta P1. Progettata per la rimozione di lievi strati di tartaro e per la rifinitura del canale radicolare.

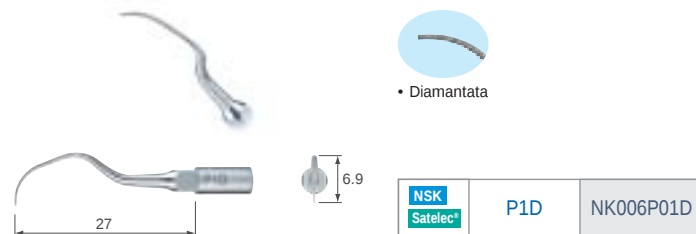


P10

Questa punta assicura la rimozione di macchie sotto-gengivali ma può essere utilizzata anche per le curettes manuali.




P2D / P3D (da sopra)

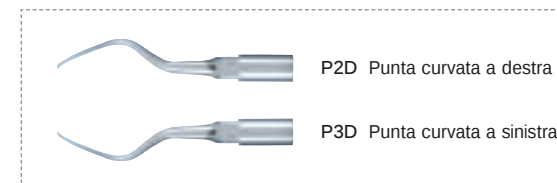

P2D

Punta diamantata in grado di rimuovere il tartaro più persistente depositato nella zona sotto-gengivale. Punta curvata a destra.

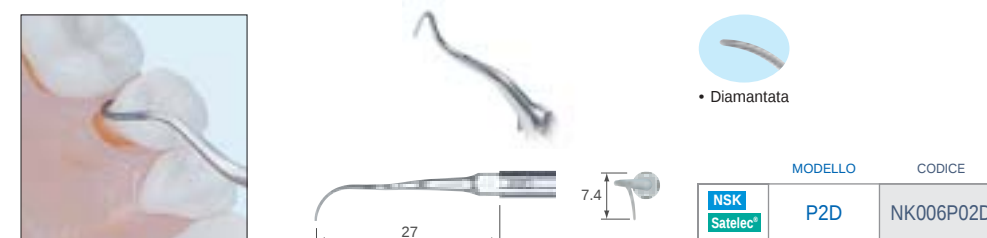


P3D

Punta curvata a sinistra.



Perio Kit A

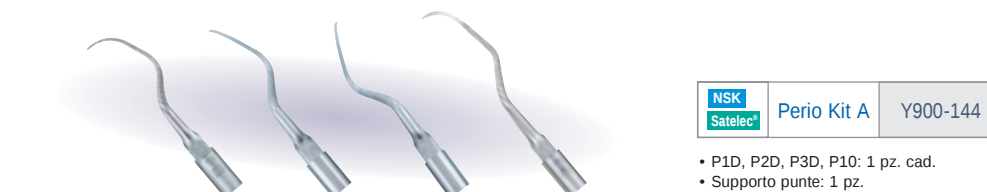

PERIO (ROOT PLANING)

P20

Punta diritta.



	MODELLO	CODICE
NSK Satelec®	P20	NK006P020
EMS®	P20-E	NK006P020E

P21R

Punta curvata a destra.



	MODELLO	CODICE
NSK Satelec®	P21R	NK006P21R
EMS®	P21R-E	NK006P21RE

P21L

Punta curvata a sinistra.



	MODELLO	CODICE
NSK Satelec®	P21L	NK006P21L
EMS®	P21L-E	NK006P21LE

P21R / P20 / P21L / P25R / P25L (da sopra)



P21R Punta curvata a destra
P20 Punta diritta
P21L Punta curvata a sinistra



P25R Punta curvata a destra
P25L Punta curvata a sinistra

P25R

Punta per applicazioni root planing di forcazione dei molari e di complesse superfici curve.
Punta curvata a destra.



	MODELLO	CODICE
NSK Satelec®	P25R	NK006P25R
EMS®	P25R-E	NK006P25RE


P25L

Punta curvata a sinistra.



	MODELLO	CODICE
NSK Satelec®	P25L	NK006P25L
EMS®	P25L-E	NK006P25LE

Perio Kit B

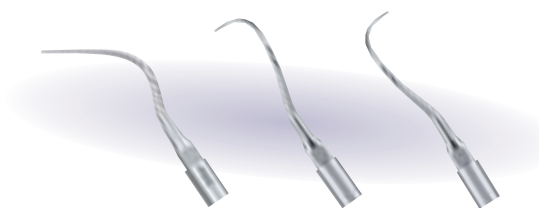

	Perio Kit B	Y900-145
--	-------------	----------

- P20, P25R, P25L: 1 pz. cad.
- Supporto punte: 1 pz.





PERIO (Irrigazione e Detersione)



Per una detersione efficace a seguito di ablazione e debridement radicolare.



P40

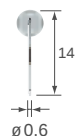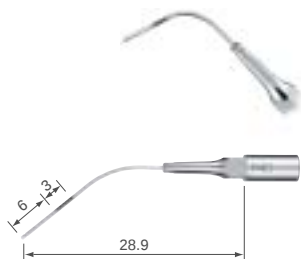

MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	P40	NK006P040

• Diametro punta $\varnothing$ 0.6 mm


P41

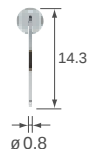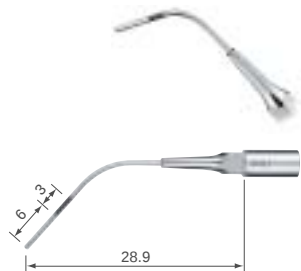

MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	P41	NK006P041

• Diametro punta $\varnothing$ 0.8 mm

Due punti di irrigazione

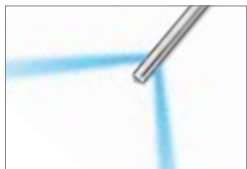

- Irrigazione da due punti situati lateralmente alla sommità.
- Detersione efficace indipendentemente dall'angolo dell'inserito.
- Sicuri da usare indipendentemente dalla condizione della tasca, grazie all'indicazione della lunghezza (da 3 mm a 6 mm).
- Estremità arrotondata per maggior sicurezza nel parodonto.



IMPLANTOLOGIA (Punte V-Tip)



Per la cura di protesi ed impianti.

Queste punte sono prodotte con un materiale speciale che permette un debridement sicuro, senza provocare danni ai metalli e agli impianti.

V10



V-P10

• Conf. da 3 pz.



MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	V10	NK006VH10

* La punta di plastica non è inclusa



MODELLO		CODICE
V-P10		NK006VP10

ENDODONZIA

NSK offre punte da endodonzia per la realizzazione di veloci ed efficaci svasature, irrigazioni e riempimenti canalari. Lime e punte diamantate per l'ampliamento del canale radicolare, punte per l'irrigazione del canale radicolare, punte per l'otturazione con guttaperca, punte per la rimozione di frammenti dal canale radicolare.



ENDODONZIA

E4


Per la detersione canalare radicolare e la rimozione di frammenti.



	MODELLO	CODICE
	E4	NK006BE04

E4D

Per la detersione e l'ampliamento canalare radicolare.

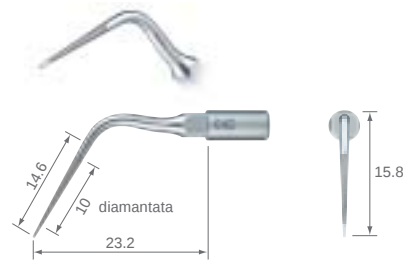

• Diamantata

	MODELLO	CODICE
	E4D	NK006BE4D

E7

Rimozione di otturazioni e di frammenti.



• Irrigazione non necessaria

	MODELLO	CODICE
	E7	NK006BE07

E7D

Ampliamento della parete canalare radicolare.



• Diamantata

	MODELLO	CODICE
	E7D	NK006BE7D

E8

Rimozione di otturazioni e di frammenti.



• Irrigazione non necessaria

	MODELLO	CODICE
	E8	NK006BE08

E8D

Ampliamento della parete canalare radicolare.



• Diamantata

	MODELLO	CODICE
	E8D	NK006BE8D

ENDODONZIA

E5

Condensazione laterale.



- Irrigazione non necessaria

	MODELLO	CODICE
	E5	NK006BE05

E6

Condensazione laterale.




- Irrigazione non necessaria

	MODELLO	CODICE
	E6	NK006BE06

Endo Kit E11

Per anteriori.

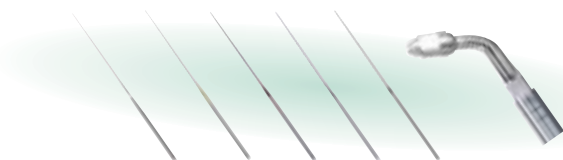


	MODELLO	CODICE
	Endo Kit E11	Y900-146

- E11: 1 pz.
- Chiave per punte E inclusa
- File 33 mm #15, #20, #25, #30, #35: conf. da 6 pz. per ogni misura

E11

Supporto con angolazione 120° per File.

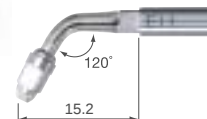


- Per File (Gambo Ø 0.8 mm)
- Per detersione canale radicolare
- Per anteriori
- Chiave per punte E inclusa
- * File opzionale

	MODELLO	CODICE
	E11	NK006BE11

E12

Supporto con angolazione 95° per File.

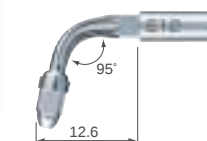

- Per File (Gambo Ø 0.8 mm)
- Per detersione canale radicolare
- Per posteriori
- Chiave per punte E inclusa
- * File opzionale

	MODELLO	CODICE
	E12	NK006BE12

File


Lunghezza: 33 mm
Diametro gambo: 0.8 mm

- ISO15 • Conf. da 6 pz.
- ISO20 • Conf. da 6 pz.
- ISO25 • Conf. da 6 pz.
- ISO30 • Conf. da 6 pz.
- ISO35 • Conf. da 6 pz.

File 33 mm / #15	NK006UF15
File 33 mm / #20	NK006UF20
File 33 mm / #25	NK006UF25
File 33 mm / #30	NK006UF30
File 33 mm / #35	NK006UF35

Endo Kit E12

Per posteriori.

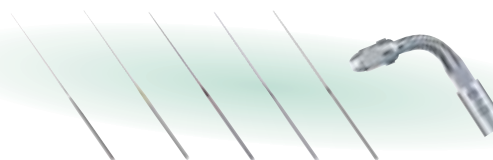

	MODELLO	CODICE
	Endo Kit E12	Y900-147

- E12: 1 pz.
- Chiave per punte E inclusa
- File 33 mm #15, #20, #25, #30, #35: conf. da 6 pz. per ogni misura



ENDODONZIA (Punte V-Tip)

V30




MODELLO	CODICE
NSK Satelec® V30	NK006VH30

- Chiave per punte E inclusa
- * File opzionale

Per detersione canalare

V-S50


- Per detersione canalare 17 mm
- Conf. da 3 pz.

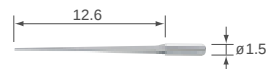

V-S50	NK006VS50
-------	-----------

V-S51

- Per detersione canalare 23 mm
- Conf. da 3 pz.

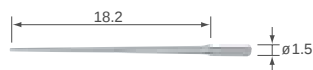

V-S51	NK006VS51
-------	-----------

V-S52

- Per detersione canalare 26 mm
- Conf. da 3 pz.



V-S52	NK006VS52
-------	-----------

V-S53

- Per detersione canalare 32 mm
- Conf. da 3 pz.



V-S53	NK006VS53
-------	-----------

V30



MODELLO	CODICE
NSK Satelec® V30	NK006VH30


- Chiave per punte E inclusa
- * File opzionale

Per ampliamento canalare

Al fine di ridurre effetti inopportuni, non vi è rivestimento diamantato nell'ultimo mm della punta.

V-S50D

- Diamantata
- Per ampliamento canalare 17 mm
- Conf. da 3 pz.

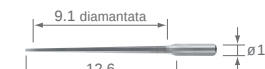

V-S50D	NK006V50D
--------	-----------

V-S51D

- Diamantata
- Per ampliamento canalare 23 mm
- Conf. da 3 pz.



V-S51D	NK006V51D
--------	-----------

V-S52D

- Diamantata
- Per ampliamento canalare 26 mm
- Conf. da 3 pz.



V-S52D	NK006V52D
--------	-----------

V-S53D

- Diamantata
- Per ampliamento canalare 32 mm
- Conf. da 3 pz.



V-S53D	NK006V53D
--------	-----------



CHIRURGIA ENDODONTICA RETROGRADA

La microscopica punta diamantata permette un'efficace rimozione della dentina apicale. Vi sono 2 tipi di punte angolate (90°, 70°) utilizzabili per gli anteriori e altri 2 tipi di punte curve (destra e sinistra) utilizzabili per i molari.

E30RD

Punta diamantata che permette un'efficace preparazione della cavità.

- Diamantata
- Per posteriori (angolazione a destra)

	MODELLO	CODICE
NSK Satelec	E30RD	NK006E30R

E30LD

Punta diamantata che permette un'efficace preparazione della cavità.

- Diamantata
- Per posteriori (angolazione a sinistra)

	MODELLO	CODICE
NSK Satelec	E30LD	NK006E30L

E30RD / E30LD (da sopra)



E31D

Punta diamantata che permette un'efficace preparazione della cavità.

- Diamantata
- Per anteriori (70°)

	MODELLO	CODICE
NSK Satelec	E31D	NK006E31D

E32D

Punta diamantata che permette un'efficace preparazione della cavità.

- Diamantata
- Per anteriori (90°)

	MODELLO	CODICE
NSK Satelec	E32D	NK006E32D

Retro Kit

	MODELLO	CODICE
NSK Satelec	Retro Kit	Y900-149

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: 1 pz. cad.
- Supporto punte: 1 pz.

CONSERVATIVA

Viene applicata una vibrazione ultrasonica alla superficie del dente. Il manipolo compatto è ideale per bocche piccole e in zone dove il manipolo con strumenti rotanti trova difficile accesso. È disponibile una grande varietà di punte per la rimozione della carie e per la caratterizzazione della superficie dentale.





CONSERVATIVA (Punte V-Tip)

Per micro-conservativa

Le punte Varios V-Tip NSK sono state progettate per eseguire procedure dentali di micro-conservativa. In alternativa alle tecniche di taglio, le punte Varios offrono una precisa ed efficace tecnologia di incisione ad ultrasuoni. Questo tipo di incisione permette un preciso movimento della punta in grado di rimuovere la carie dalla dentina, mantenendo protetta la dentina sana.

V30

MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	V30	NK006VH30

- Chiave per punte E inclusa
- * File opzionale

V-G70

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

V-G70	NK006VG70
-------	-----------

V-G71

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

V-G71	NK006VG71
-------	-----------

V-G72

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

V-G72	NK006VG72
-------	-----------

MI Starter Kit

NSK Satelec®	MI Starter Kit	Y900-150
--------------	----------------	----------

- Supporto V-Tip V30: 1 pz.
- Chiave per punte E inclusa
- V-G70, V-G71, V-G72, V-S1, V-S3, V-S33, V-G77, V-G78, V-G79: 1 pz. cad.



V30

MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	V30	NK006VH30

- Chiave per punte E inclusa
- * File opzionale

V-G75

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

V-G75	NK006VG75
-------	-----------

V-G76

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

V-G76	NK006VG76
-------	-----------

Kit Assortito

Kit Assortito	Y900-158
---------------	----------

- V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76: 1 pz. cad.




CONSERVATIVA (Punte V-Tip)

Per rifinitura e lucidatura

Sono disponibili 3 gradi di particelle diamantate (Normale, Sottile, Ultra Sottile). Per la lucidatura della superficie del dente.

V30

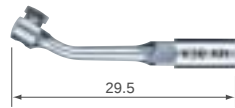


MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	V30	NK006VH30
• Chiave per punte E inclusa * File opzionale		

V-G77

Normale

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

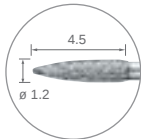


V-G77	NK006VG77
-------	-----------

V-G78

Sottile

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

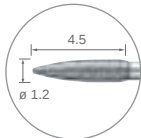


V-G78	NK006VG78
-------	-----------

V-G79


Ultra Sottile

- Diamantata
- Conf. da 3 pz.

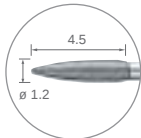

V-G79	NK006VG79
-------	-----------

Kit Assortito

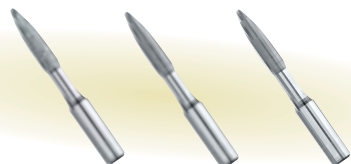

Kit Assortito	Y900-168
------------------	----------

- V-G77, V-G78, V-G79: 1 pz. cad.




CONSERVATIVA (Punte V-Tip)

Per micro-cavità

Le punte V-S1, V-S3 e V-S33 sono molto efficaci nella preparazione della cavità per micro-conservativa. Sono disponibili 3 tipi di punte in base alle esigenze di preparazione della cavità.


V30

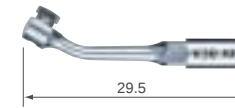

MODELLO		CODICE
NSK Satelec®	V30	NK006VH30
• Chiave per punte E inclusa * File opzionale		

V-S1


- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz.

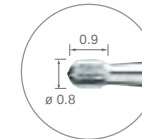

V-S1	NK006VS01
------	-----------

V-S3


- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz.

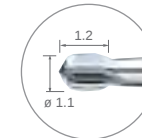

V-S3	NK006VS03
------	-----------


V-S33

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz.

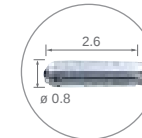

V-S33	NK006VS33
-------	-----------

Kit Assortito

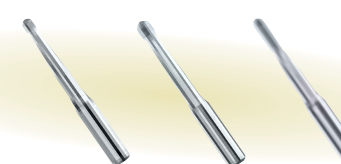

Kit Assortito	Y900-164
------------------	----------

- V-S1, V-S3, V-S33: 1 pz. cad.

G61D

Questa punta è dotata alla sommità di un diamante sferico. Raramente si presentano casi di emorragia (G61D / G62D).



G62D




G65D

Per carie interdentali prossimali nei molari. Il disegno emisferico della punta non permette l'incisione del dente prossimale. (G65D / G67D / G66D / G68D)



G67D

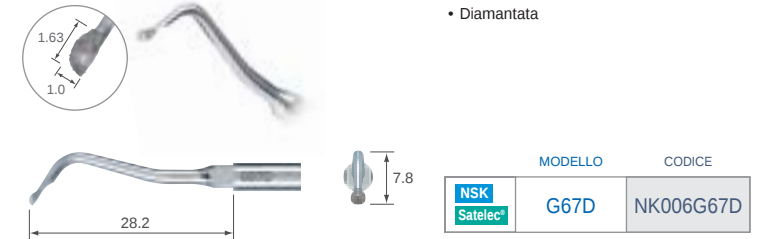


G66D

Per carie prossimali negli anteriori. Viene rimossa solo la carie della dentina. (G65D / G67D / G66D / G68D)



G68D

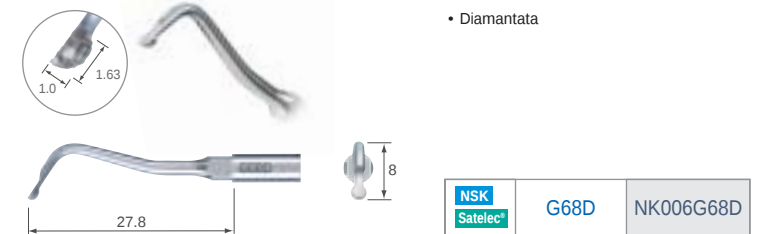

PROTESICA

Punte per la rimozione di protesi, per
la condensazione dell'amalgama.
Ma anche per scaling, perio ed endodonzia.




PROTESICA

Condensazione / Levacorone

G21

La vibrazione ultrasonica rimuove le bolle di cemento per una precisa cementazione.

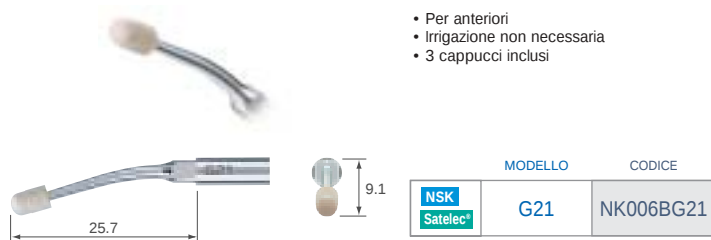

- Per anteriori
- Irrigazione non necessaria
- 3 cappucci inclusi

G25

Per la rimozione di corone.



- Irrigazione non necessaria

G22

La vibrazione ultrasonica rimuove le bolle di cemento per una precisa cementazione.



- Per anteriori
- Irrigazione non necessaria
- 3 cappucci inclusi

G26

Per la rimozione di perni.



- Irrigazione non necessaria

Cappucci punte



- Per G21 / G22
- Conf. da 10 pz.

Cappucci punte	NK0060CAP
----------------	-----------

- Sterilizzabile in autoclave

G28

Condensazione di amalgama per otturazione.



- Irrigazione non necessaria

Serie Varios

3 diverse unità di controllo adattabili ai manipoli con e/o senza luce

Varios 750

Con Luce
Senza Luce

OTTIMA VERSATILITÀ CLINICA

NSK ha sviluppato il Sistema Ultrasonico Varios 750 per favorire un'ampia gamma di applicazioni cliniche. Varios 750 può essere utilizzato per applicazioni Perio, di chirurgia endodontica oltre che per applicazioni di micro-conservativa. Nell'area Perio, Varios 750 copre operazioni di scaling e di disinfezione delle tasche periodontali. Per quanto riguarda la chirurgia endodontica, questo strumento permette la rimozione, l'ampliamento e la pulizia di residui posti nel canale radicolare. In Conservativa, vengono garantiti tutti i trattamenti di tipo micro-invasivo. La speciale bottiglia di Varios 750, insieme al sistema di rifornimento dell'acqua del riunito, assicura la giusta soluzione per ogni tipo di applicazione.



Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230V 50/60 Hz
- Frequenza : 28-32 KHz
- Potenza Max in uscita : 8 W (modalità G)
- Dimensioni : L162 x P274 x H120 (mm)
- Peso : 2,2 kg
- Volume bottiglia : 350 ml

Varios 750 Set Completo



Con Luce

Set completo Varios 750 Lux

MODELLO CODICE

Varios 750 Lux NK006A007

Senza Luce

Set completo Varios 750

MODELLO CODICE

Varios 750 NK006A004

Il Set contiene:

- Unità di controllo • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling G1, G4, G6 • Pedale di controllo (FC-15)
- 2 bottiglie per soluzione • Set di filtri per l'acqua • Connettore per la fornitura d'acqua
- Chiave dinamometrica per punte • Porta punte • Copertura per punte S • Cordone di alimentazione

Varios 560

Con Luce
Senza Luce

ABLATORE ULTRASONICO MULTI-FUNZIONALE

3 Modalità di potenza

Adesso disponibile con il manipolo Varios con luce, Varios 560 offre 3 modalità di potenza che possono essere selezionati semplicemente premendo un tasto. A seconda della modalità selezionata è applicabile un certo tipo di punta e le scelte sono: "G" (Generale), "E" (Endodonzia) e "P" (Perio). La modalità selezionata viene indicata con Ledluminosi. Quindi, grazie al selettore di potenza è possibile affinare la potenza in modo adeguato rispetto alla modalità selezionata. Inoltre, selezionando la modalità "P", si attiva la potenza minima stabile che assicura un trattamento Perio più efficiente.



Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230V 50/60 Hz
- Frequenza : 28-32 KHz
- Potenza Max in uscita : 8 W (modalità G)
- Dimensioni : L109 x P194 x H95 (mm)
- Peso : 1,2 kg

Varios 560 Set Completo



Con Luce

Set completo Varios 560

MODELLO CODICE

Varios 560 Lux NK006A013

Senza Luce

Set completo Varios 560

MODELLO CODICE

Varios 560 NK006A012

Il Set contiene:

- Unità di controllo • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling G1, G4, G6 • Pedale di controllo (FC 15)
- Set di filtri per l'acqua • Connettore per la fornitura d'acqua • Chiave dinamometrica per punte
- Porta punte • Copertura per punte S • Cordone di alimentazione

Varios 350

Con Luce
Senza Luce

ABLATORE ULTRASONICO MULTI FUNZIONALE COMPATTO

Compatto e Leggero

Varios 350 è stato concepito per essere compatto e portatile ma anche con la possibilità di essere montato su qualsiasi riunito. Di design semplice, è facile da utilizzare in un ampio campo di applicazioni cliniche. E' disponibile la versione sia con fibre ottiche che senza fibre ottiche.

3 modalità di potenza

Ruotando la manopola si seleziona una delle 3 modalità di potenza. A seconda della modalità selezionata è applicabile un certo tipo di punta e le scelte sono: "G" (Generale), "E" (Endodonzia) e "P" (Perio). La modalità selezionata può essere visualizzata tramite l'indicatore a colori sul frontale dell'unità di controllo. La manopola della potenza permette la corretta regolazione per ogni modalità selezionata. Inoltre, selezionando la modalità "P" si attiva la potenza minima stabile che assicura un trattamento Perio più efficiente.



Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230 V 50/60 Hz
- Frequenza : 28-32 KHz
- Potenza Max in uscita : 8 W (modalità G)
- Dimensioni : L80 x P125 x H32 (mm)
- Peso (unità controllo e manipolo) : 435 g (Varios 350Lux) - 393 g (Varios 350)



Varios 350 Set Completo



Con Luce

Varios 350 LUX Set Completo

MODELLO

CODICE

Varios 350 Lux

NK006A006

Senza Luce

Varios 350 Set Completo

MODELLO

CODICE

Varios 350

NK006A002

Il Set contiene

- Unità di controllo con cordone
- Manipolo
- 3 punte G1, G4, G6
- Adattatore AC
- Porta manipolo
- Pedale di controllo (FC 15)
- Set di filtri per l'acqua
- Connettore per la fornitura d'acqua
- Chiave dinamometrica per punte
- Porta punte
- Copertura per punte S



Regolazione potenza per ogni applicazione clinica

Selezionare correttamente la potenza adeguata per ogni tipo di punta.

Punta	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
SCALING			
G1	Min ~ 3	S 1 ~ 8	0 ~ 50% (1 ~ 5)
G2	Min~Max	S 1 ~ 7	0 ~ 50% (1 ~ 6)
G3	Min ~ 3	S 1 ~ 5	0 ~ 25% (1 ~ 3)
G4	Min ~ 3	S 1 ~ 4	0 ~ 25% (1 ~ 2)
G5	Min ~ 3	S 1 ~ 4	—
G6	Min ~ 1	S 1 ~ 5	0 ~ 50% (1 ~ 4)
G7	Min~Max	S 1 ~ 10	—
G11	Min ~ 3	S 1 ~ 6	—
G12	Min ~ 3	S 1 ~ 10	—
G13	Min ~ 3	S 1 ~ 7	—
PERIO			
P1	Min ~ 2	P 1 ~ 10	—
P1D	Min ~ 2	P 1 ~ 10	—
P2D	Min ~ 4	P 1 ~ 10	—
P3D	Min ~ 4	P 1 ~ 10	—
P10	Min~Max	P 1 ~ 10	—
P20	Min ~ 4	P 1 ~ 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P21R	Min ~ 4	P 1 ~ 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P21L	Min ~ 4	P 1 ~ 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P25R	Min ~ 4	P 1 ~ 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P25L	Min ~ 4	P 1 ~ 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P40	Min ~ 1	P 1 ~ 3	—



Punta	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
P41	Min ~ 1	P 1 ~ 5	—
V-P10	2 ~ 3	P 1 ~ 7	—
ENDODONZIA			
E4	Min ~ 3	E 1 ~ 6	—
E4D	Min ~ 3	E 1 ~ 6	—
E5	1 ~ 3	E 3 ~ 8	—
E6	2 ~ 4	E 3 ~ 10	—
E7	3 ~ Max	E 4 ~ 10	—
E7D	3 ~ Max	E 4 ~ 10	—
E8	2 ~ 4	E 4 ~ 9	—
E8D	2 ~ 4	E 4 ~ 10	—
E11	Min ~ 3	E 1 ~ 8	—
E12	Min ~ 3	E 1 ~ 8	—
V-S50	Min ~ 3	E 1 ~ 4	—
V-S50D	Min ~ 3	E 1 ~ 4	—
V-S51	Min ~ 1	E 1 ~ 3	—
V-S51D	Min ~ 1	E 1 ~ 3	—
V-S52	Min ~ 2	E 1 ~ 6	—
V-S52D	Min ~ 2	E 1 ~ 6	—
V-S53	Min ~ 2	E 1 ~ 7	—
V-S53D	Min ~ 2	E 1 ~ 7	—
E30RD	1 ~ 3	E 1 ~ 8	—
E30LD	1 ~ 3	E 1 ~ 8	—

Punta	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
E31D	E 1 ~ 3	E 1 ~ 8	—
E32D	E 1 ~ 3	E 1 ~ 8	—
CONSERVATIVA			
G61D	Min ~ 2	S 1 ~ 8	—
G62D	Min ~ 3	S 1 ~ 7	—
G65D	Min ~ 2	S 1 ~ 3	—
G66D	Min ~ 2	S 1 ~ 6	—
G67D	Min ~ 3	S 1 ~ 7	—
G68D	Min ~ 3	S 1 ~ 8	—
V-G70	Min ~ 3	S 1 ~ 5	—
V-G71	Min ~ 3	S 1 ~ 5	—
V-G72	Min ~ 3	S 1 ~ 4	—
V-G75	Min ~ 1	S 1 ~ 2	—
V-G76	Min ~ 3	S 1 ~ 6	—
V-G77	Min~Max	E 1 ~ 9	—
V-G78	Min~Max	E 1 ~ 9	—
V-G79	Min~Max	E 1 ~ 9	—
V-S1	Min ~ 3	E 1 ~ 6	—
V-S3	Min ~ 3	E 1 ~ 6	—
V-S33	Min ~ 3	E 1 ~ 6	—

Punta	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
PROTESICA			
G21	Min ~ 2	S 1 ~ 3	—
G22	Min ~ 2	S 1 ~ 3	—
G25	2 ~ 4	S 4 ~ 6	—
G26	3 ~ Max	S 4 ~ 7	—
G28	Min ~ 2	S 1 ~ 2	—

Guida alla Regolazione di potenza EMS

Ruotare la manopola di controllo potenza dalla posizione 0 su 25%, 50%, 75% e 100%.

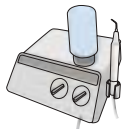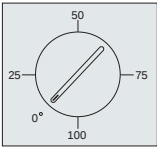

Satelec® & P-Max sono marchi registrati da Acteon SA, Francia.
EMS®, Piezon & Mini Piezon sono marchi registrati da Electro Medical Systems SA, Svizzera.



NSK

Expect Perfection®



20142 Milano - Via Rimini, 22
Tel. 02/895981 - Fax 02/89504249
dentalica@dentalica.com
www.dentalica.com



Expect Perfection®